

TEST OP CORONA

INSTRUCTIES ANTILICHAMEN TEST


Antilichamen test SW40005, middels een bloedmonster

De BIOSYNEX COVID-19 BSS (IgG/IgM) is een snelle chromatografische immuunttest voor de kwalitatieve detectie van IgG- en IgM-antilichamen tegen SARS-COV-2 bij de mens in volbloed, serum of plasma en bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose van SARS-COV-2-infecties.

HET AFNEMEN VAN HET MONSTER

BIOSYNEX COVID-19 BSS (IgG/ IgM) kan worden uitgevoerd dmv een vingerprik OPM. De test dient onmiddellijk te worden uitgevoerd na de monsterafname. Bewaar de monsters niet langdurig op kamertemperatuur.

1. Haal de testcassette uit de steriele verpakking
2. Plaats de testcassette op de tafel/onderlegger
3. Masseer de vinger zonder de punctieplaats aan te raken door naar de vingertop van de middel- of ringvinger te wrijven.
4. Doorboor de huid met een steriel lancet (prikpen). Plaats hiervoor de prikpen goed recht op de huid en druk op de blauwe knop om de naald te schieten.

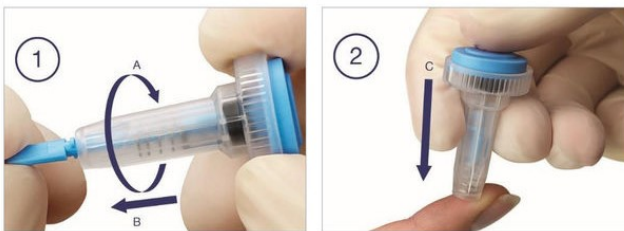

5. Druk voorzichtig op de vinger om een afgeronde druppel bloed over de punctieplaats te vormen. Neem deze druppel op met de pipet (rietje) en voeg het vingerprik-bloedmonster toe aan de testcassette.

TESTPROCEDURE

1. Houd het rietje verticaal, zuig het monster op tot aan de vullijn (ongeveer 10µl) en breng het monster over naar het testvak (S) van de testcassette. Voeg vervolgens twee druppels buffer (ongeveer 80µl) toe aan het buffervak (B) en start de timer. Vermijd luchtballen in het testvak.
2. Het testresultaat moet na 10 minuten worden afgelezen. Interpreteer het resultaat niet na 20 minuten. In de eerste paar minuten kan er een positief resultaat worden weergegeven

